




I. a Installatie Software voor Windows ®

Windows 95 / 98 / NT / 2000 / ME / XP

1. De CD-Rom in de PC steken en de „HMS Setup“ knop aanklikken en de installatie richtlijnen volgen. In het geval de CD niet automatisch opstart, gelieve via „Mijn Computer“ te proberen of de instructies te volgen in de handleiding.

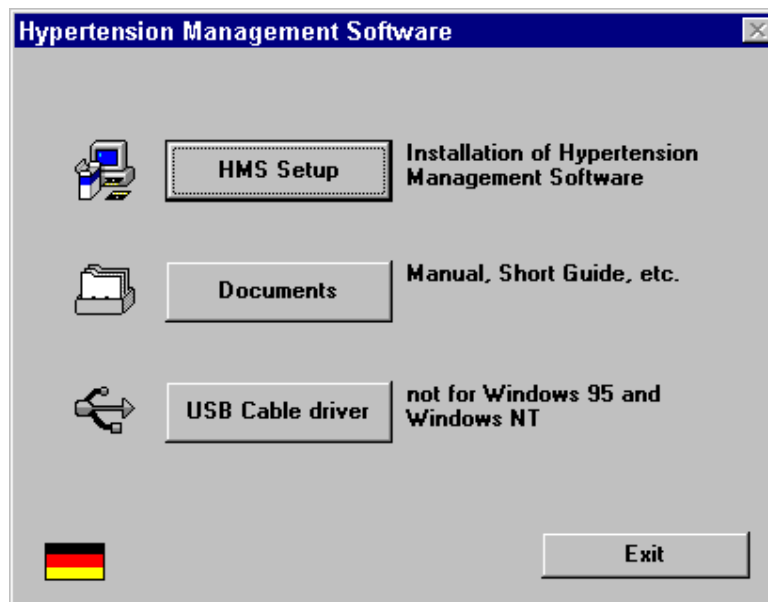

2. U kiest de taal uit: klik op "verder"
3. U sluit alle Windows Programma's klik op "verder"
4. Standaard wordt het programma onder c:/ABDM geïnstalleerd klik op "verder"
(indien niet absoluut noodzakelijk, dan niet wijzigen)


Indien het programma al geïnstalleerd is, dan stopt u de installatie hier en volgt u de richtlijnen zoals beschreven in III. (CD opnieuw in de PC inbrengen).

5. U brengt de naam en plaats van de praktijk in klik op "verder"
(beiden absoluut duidelijk inbrengen)
6. U bevestigt de ingebrachte gegevens *ja*
7. Vanaf hier alle overige vensters bevestigen tot het venster „Hypertensie Management Installatie is compleet“ verschijnt klik op "verder"
8. Deze melding bevestigen met OK *o.k.*
9. Nu nog de shortcuts instellen op het bureaublad.




I b. Schortcut op het bureaublad

- Icoon  met de rechterknop van de muis aanklikken
- “knippen” selecteren
- en vervolgens plakken op het bureaublad.

Het programma kan nu opgestart worden door op  te dubbelklikken. U haalt de CD-ROM uit de PC.

II. Installatie USB-Driver

-  **Vóór** dat u de USB-Kabel met de PC verbindt, brengt u opnieuw de CD-rom in de PC en kiest u de knop „USB Cable Driver“.
- U volgt de installatierichtlijnen op, u bevestigt de meldingen door op „next“ te drukken en u beëindigt de installatie door op “*Finish*” te drukken.
- Vervolgens kunt u pas de USB-Kabel aansluiten op de PC, en Windows beëindigt de installatie van de driver automatisch.

III. Update Hypertensie Management Software voor Windows

Een Update voert u door indien er al een HMS-versie of “ABDM voor Windows” bestaat.

- Om een hypothetisch verlies van gegevens te vermijden maakt u een kopie van de databank ABDM.MDB. Die vindt u onder de file van het geïnstalleerde programma (bv. C:\ABDM)
- U brengt vervolgens de CD-Rom in de PC en kiest vervolgens in het dialoogvenster de optie „Update“. Alle gegevens van de patiënten en de overeenstemmende metingen worden behouden.

Support

U kunt ons direct contacteren voor support tussen 8u30 en 17u30:

Vitalsys NV
Paleizenstraat 44
1030 Brussel

Tel.: +32 2 211 34 26

Fax: +32 2 211 34 05

E-Mail: support@vitalsys.be