


## 6 De batterijen vervangen / Oplossen van problemen

Verwissel de batterijen wanneer op het display van de weegschaal de boodschap "bAtt" staat of als er geen gewichtsmeting kan worden doorgezonden.

**MERK OP:** Het wisselen van de batterij zal het interne geheugen van de weegschaal wissen. Batterij: 9 V Alkaline (Type 6LR61.)

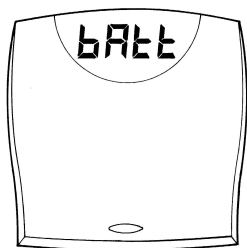

Afb.3: Vervang batterij



Afb.4: De batterij opnieuw insteken

Gelieve de instructies van hoofdstuk 4 te volgen na het vervangen van de batterijen.

## 7 Geluidssignalen

Signal	Description
1 kort signaal	Bevestiging (meting, transmissie)
3 korte signalen	Vorbereiden van transmissie
12 korte signalen	fout; geen transmissie

## 8 Foutboodschappen

Error	Description
<b>Err0</b>	Geen initialisatie; start opnieuw
<b>Err1</b>	Geen stabiele gewicht; herhaal meting
<b>Err2</b>	Te zwaar > 150 kg. ; stap van de weegschaal.
<b>bAtt</b>	batterij is leeg; vervang de batterij

Uw partner voor medische technologieën::

Vitalsys nv  
 Paleizenstraat 44  
 1030 Brussel  
 Tel.: +32 2 211 34 26  
 Fax: +32 2 218 89 73  
 E-mail: [info@vitalsys.be](mailto:info@vitalsys.be)  
 Web: [www.vitalsys.be](http://www.vitalsys.be)



# Handleiding

## VitalScale Telemonitoring Weegschaal

### Content:

1	Introductie	1
2	Garantie	1
3	De GSM gebruiken	2
4	De weegschaal gebruiken	2
4.1	Eerste maal	2
4.2	Gebruik weegschaal	3
5	Meting en transmissie	3
6	De batterijen vervangen/ Oplossen van problemen	4
7	Geluidssignalen	4
8	Foutmeldingen	4

## 1 Introductie

De elektronische weegschaal van Vitalsys is ontwikkeld om nauwkeurig uw gewicht te meten. De weegschaal is uitgerust met een Bluetooth-interface om een automatische draadloze verbinding met uw GSM of zender (modem) mogelijk te maken.

## 2 Garantie

Opgelet: Gelieve de verpakking na te kijken op mogelijke beschadigingen vooraleer u de weegschaal voor de eerste keer gebruikt.

- Gebruik de weegschaal nooit als ze beschadigd is. Indien het toestel beschadigd is, contacteer ons dan onmiddellijk.
- Gelieve de weegschaal niet in direct zonlicht te plaatsen.
- Reinig de weegschaal enkel met een droog doekje. Zorg ervoor dat er geen water kan binnendringen in de weegschaal

**Belangrijk!** Vitalsys is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor kosten en beschadigingen die te wijten zijn aan een onprofessioneel gebruik van de weegschaal

### 3 De GSM gebruiken

- 1 Gelieve ervoor te zorgen dat de batterij steeds is opgeladen. Om op te laden, verbind het toestel met een stopcontact. Als u uw GSM **enkel** gebruikt om data van de weegschaal door te zenden, raden we u aan om de GSM steeds verbonden te laten met het stroomnetwerk.
- 2 Zet uw GSM aan en geef de pincode van uw GSM in. Bevestig door OK te drukken. Na bevestiging, activeer de Bluetooth verbinding van uw GSM (raadpleeg de handleiding van uw GSM).


### 4 De weegschaal gebruiken

#### 4.1 Eerste maal

- 1 Zet de weegschaal, GSM en BT-Pin (**6624**) naast elkaar.  
Open het compartiment van de batterijen aan de achterkant van de weegschaal.
- 3 Verwijder oude batterijen indien nodig. Zorg ervoor dat uw BT-pin en GSM beschikbaar zijn!

**Belangrijk:** Na het aansluiten van de batterijen hebt u slechts enkele seconden om uw BT-pin in te geven in uw GSM. Als het niet lukt binnen deze tijd, kan u gewoon stap 3 herhalen.

- 4 Verbind de batterij met de connectiepunten. U zal 3 geluidssignalen horen (als u geen signalen hoort, herhaal dan stap 3.) **U gebruikt een toestel dat al verbonden is (weegschalen en gsm's)? U kan dan deze verbinding eenvoudig weigeren met uw GSM. De weegschaal reageert hierop met 12 korte geluidssignalen.**
- 5 Het display van uw GSM zal u vragen om uw BT-PIN in te geven. Geef nu uw BT-PIN in en bevestig met OK. De GSM zal nu de toepassing toevoegen in de toepassingenlijst. Bevestig indien nodig met OK.
- 6 Als de BT-PIN correct is ingegeven zal de weegschaal één geluidsgeluidssignaal laten horen.
- 7 **Deze stap is essentieel als u nieuwe batterijen in het toestel steekt.** Tik het oppervlak van de weegschaal zachtjes aan met uw voet. Nadat u „oooo“ ziet verschijnen op het display, is de weegschaal klaar voor gebruik.

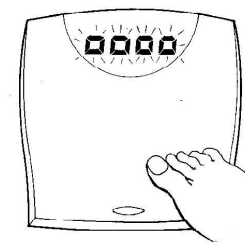


Afb. 1:  
Tik het oppervlak  
aan met uw voet

#### 4.2 Gebruik weegschaal

- 1 Plaats de weegschaal op een harde en droge horizontale ondergrond.
- 2 Plaats de weegschaal op minder dan 10 meter afstand van uw GSM.
- 3 Als uw weegschaal al verbonden is met uw GSM („koppelen“) gan dan verder naar hoofdstuk 5

### 5 Gewichtsmeting en transmissie

- 1 Sta stil op de weegschaal tot uw stabiel staat
- 2 Als het gewicht gemeten is zal de weegschaal dit bevestigen met één enkel geluidssignaal. Uw gewicht werd opgeslagen. Als u niet wilt dat de waarde wordt doorgezonden, moet u nu van de weegschaal stappen.
- 3 Om het gewicht door te sturen, blijf dan op de weegschaal tot u één geluidssignaal hoort gevolgd door drie geluidssignalen. U kan nu van de weegschaal stappen.
- 4 Wanneer de transmissie van het gemeten gewicht succesvol was, zal de weegschaal dit laten weten met één enkel geluidssignaal.

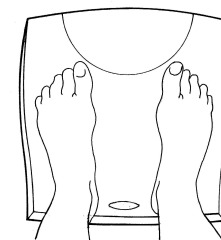

Afb. 2:  
Ga gewoon op de  
weegschaal staan,  
zonder eerst het  
oppervlak met uw voet  
aan te tikken

**Transmissie fout:** als de transmissie niet succesvol was, zal de weegschaal alarm slaan. (12 enkele geluidssignalen). Gelieve dan de gewichtsmeting en transmissie te herhalen. Indien dit een tweede keer ook niet lukt, raadpleeg dan hoofdstuk 6.