


Snel Gids

Weegschaal Mobil

STAP

①

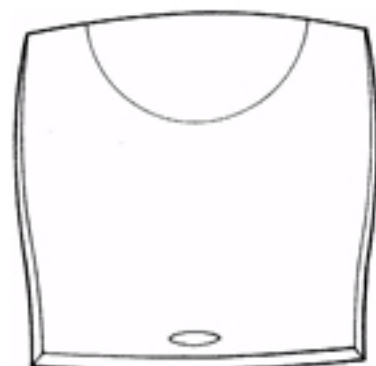


Max.
10 meter
afstand

Aanbeveling:
Zorg enkel voor een
constante verbinding
tussen het lichtnet en
uw gsm tijdens het
versturen van
metingen



②

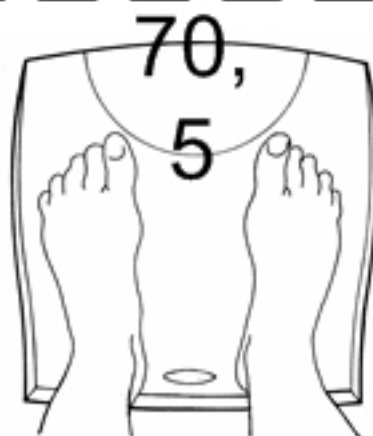

- 1 signaal
- 5 sec. wachten
- 3 geluidssignalen
- stap van de weegschaal af

③



- 20 sec. wachten
- na 1 signaal klaar!
(fout bij 12 signalen)




Snel Gids

Weegschaal Mobil

STAP

①

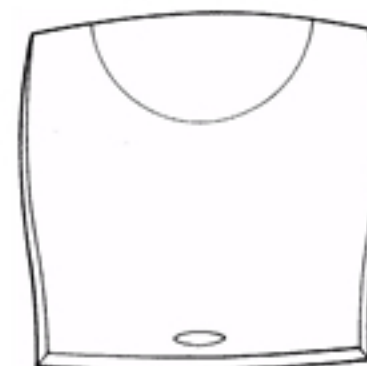

Max.
10 meter
afstand

Aanbeveling:
Zorg enkel voor een
constante verbinding
tussen het lichtnet en
uw gsm tijdens het
versturen van
metingen




②



- 1 signaal
- 5 sec. wachten
- 3 geluidssignalen
- stap van de weegschaal af

③

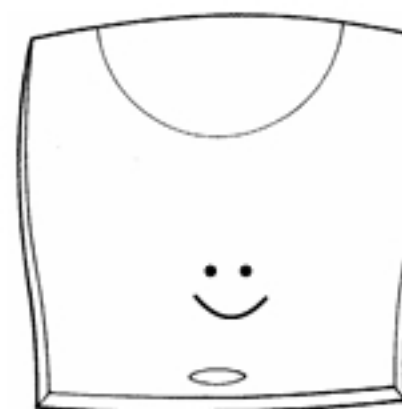

- 20 sec. wachten
- na 1 signaal klaar!
(fout bij 12 signalen)

